

DAY 7

on-line denní poradna: www.tehotenskytest.cz

www.tehotenskytest.cz

DAY 7
Těhotenský test - kazetový s kapátkem
Těhotenský test - kazetový s kapátkem
pregnancy test - card with dropper
on-line denní poradna - www.tehotenskytest.cz
pro zjištění velmi raného stádia těhotenství
pro účinky významné gravidity
very early pregnancy stage detection

Kazetový těhotenský test

s popisky a aplikačním kapátkem
– certifikovaný Notifikovanou osobou 98/79/EC.

Pro zjištění velmi rané fáze těhotenství – vysoká optimální
citlivost 20 mIU/ml hCG hormonu.

Okamžitý výsledek kdykoliv během dne.



Bližší informace o produktech a distribuci:
IVT IMUNO, s.r.o., tel.: 585 312 945, fax.: 585 313 871
e-mail: info@ivtimuno.com, www.ivtimuno.com

PROVEDENÍ TESTU

A. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU MOČI

První ranní moč obvykle obsahuje nejvyšší hladinu hCG, z tohoto důvodu ji lze považovat za nejlepší vzorek pro provedení testu. Test lze ovšem provést v kteroukoliv denní dobu. Vzorek moči odebírejte do čisté skleněné či plastikové nádoby. Nepoužívejte konzervační prostředky. Test provádějte při pokojové teplotě (15 až 28°C). Dbejte na čistotu a zamezte kontaktu testu s tekutinami před započetím testování.

B. TESTOVÁNÍ

1. Vyjměte test z ochranné fólie odtržením v místě s perforací. Položte test před sebe tak, aby jste viděla okénka s popisky - lícovou stranu testu (**viz. obr 1**), vezměte kapátko a nasajte pár kápek moči z odběrové nádobky.
2. Kapátkem aplikujte do jamky označené S (sample - vzorek) nasátou moč (**viz. obr 2**).
3. Položte test do mírně vertikální polohy (stačí do nakloněné pozice tak, aby jamka S byla dole - vzorek bude postupně vzlínat přes jednotlivé zóny testu).


C. VÝSLEDKY

po aplikaci vzorku
vyčkejte 3 - 5 min.
na zobrazení výsledků testu

kontrolní zóna C
(místo pro zobrazení
kontrolního proužku)

testovací zóna T
(místo pro zobrazení
proužku v případě
pozitivního výsledku)



jamka S
pro aplikaci
vzorku moči

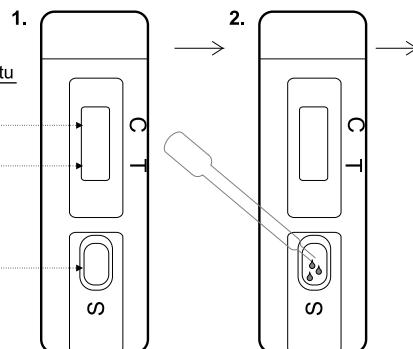

3.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

kontrolní
zábraza C
testovací
zábraza T

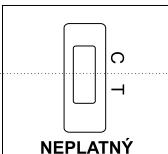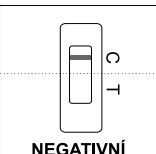

POZITIVNÍ VÝSLEDEK: přítomnost dvou růžových proužků v T + C zóně.

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK: přítomnost jednoho růžového proužku v kontrolní zóně C.

NEPLATNÝ VÝSLEDEK: žádný proužek se nezobrazil, kontrolní proužek C se neobjeví, pokud je test poškozen, není dostatečný objem vzorku k analýze nebo je test špatně proveden.

ZOPAKUJTE ANALÝZU POUŽITÍM NOVÉHO TESTU.

KONTROLA FUNKČNOSTI TĚHOTENSKÉHO TESTU
JE ZAJÍMÁNA ZOBRAZENÍM KONTROLNÍHO PROUŽKU
V ČASE 3 - 5 MINUT PO KONTAKTU SE VZORKEM

vzhledem k interpretaci výsledku testu je důležitá
jednoznačná přítomnost či absence proužku
v jednotlivých pozicích = zónách,
nikoliv velikost nebo intenzita zabarvení proužků