

# forYou<sup>®</sup> comfort



on-line denní poradna:

[www.tehotenskytest.cz](http://www.tehotenskytest.cz)

## Luxusní těhotenský test

Kategorie midstream/tyčinka (pro provedení není potřebná odběrová nádobka) – výsledkové okénko s popisem pro usnadnění vyhodnocení testu – certifikován Notifikovanou osobou 98/79/EC.

Oblíbená značka s výbornou cenou v kategorii midstream testů pro zjištění velmi rané fáze těhotenství – vysoká optimální citlivost 20 mIU/ml hCG hormonu.

Okamžitý výsledek kdykoliv během dne.  
Vícejazyčný příbalový leták (CZ, EN).

  
IVT IMUNO

**Bližší informace o produktech a distribuci:**  
IVT IMUNO, s.r.o., tel.: 585 312 945, fax.: 585 313 871  
e-mail: [info@ivtimuno.com](mailto:info@ivtimuno.com), [www.ivtimuno.com](http://www.ivtimuno.com)

## PROVEDENÍ TESTU


### ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU MOČI

První ranní moč obvykle obsahuje nejvyšší hladinu hCG, z tohoto důvodu ji lze považovat za nejlepší vzorek pro provedení testu. Test lze ovšem provést v kteroukoliv denní dobu. Test provádějte při pokojové teplotě (15 až 28°C).


### TESTOVÁNÍ

1. Vyjměte test z ochranné fólie opatrným odtržením v místě s perforací. Uchopte test za část, která je určena k manipulaci (**viz. obr. 1**).
2. Odstraňte ochranné víčko testu. **Nevyhazujte jej, ponechte si víčko v dosahu, budete jej ještě potřebovat.**
3. Otočte test výsledkovým okénkem směrem od sebe a podržte na nejméně 10 sec. v proudu moči směřujícím na aplikační část testu (**viz obr. 2**).
4. Test opět uzavřete ochranným víčkem, položte na rovnou plochu výsledkovým okénkem směrem k sobě (**viz obr. 3**).


obr.1

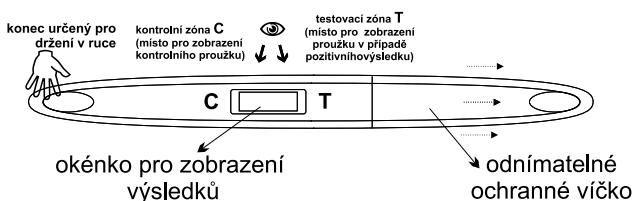

obr.2

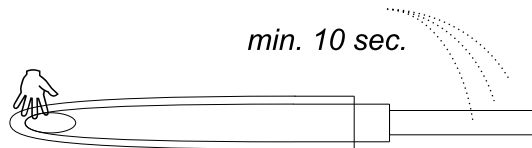

obr.3

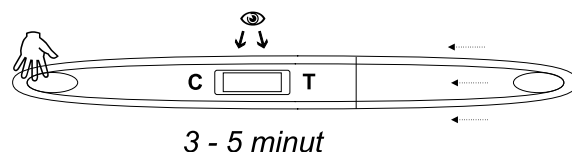

## INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

C		T	C		T	C		T
	POZITIVNÍ			NEGATIVNÍ			NEPLATNÝ	

KONTROLA FUNKČNOSTI TĚHOTENSKÉHO TESTU  
JE ZAJIŠTĚNA ZOBRAZENÍM KONTROLNÍHO PROUŽKU  
V ČASE 3 - 5 MINUT PO KONTAKTU SE VZORKEM

! **vzhledem k interpretaci výsledku testu je důležitá  
jednoznačná přítomnost či absence proužku  
v jednotlivých pozicích = zónách,  
nikoliv velikost nebo intenzita zbarvení proužků** !